



Dobre na linha Pontilhada

Dobre na linha Pontilhada

Informações do Cliente:

NÚMERO OU ANILHA

ESPÉCIE (NOME CIENTÍFICO OU COMUM) **PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**

NOME OU APELIDO (OPCIONAL)

FILIAÇÃO (OPCIONAL)

PAI

MÃE

NASCIMENTO (OPCIONAL)

____ / ____ / ____

EMPRESA OU PROPRIETÁRIO

Eu, _____
declaro que coletei e identifiquei corretamente esta amostra.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

____ / ____ / ____

DATA

ASSINATURA

Dobre na linha Pontilhada


Dobre na linha Pontilhada

SEXAGEM DE AVES (DNA) - COLETAR PENAS OU SANGUE


Importante: Utilizar apenas um kit por ave. Não coletar amostras de duas aves EM UM MESMO KIT DE COLETA

Amostra de Penas - Identificação da Ave*:

Cole aqui as penas com fita adesiva


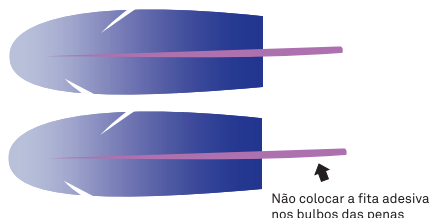


Cole aqui as penas com fita adesiva

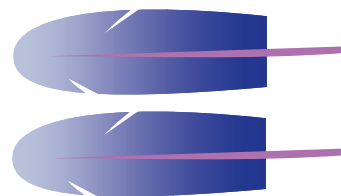

ou

Amostra de Sangue - Identificação da Ave*:

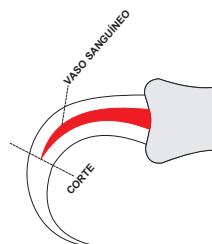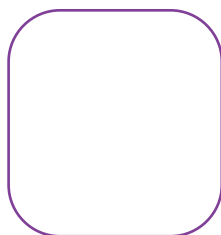

Dobre na linha Pontilhada

Dobre na linha Pontilhada

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A COLETA DE PENAS E/OU SANGUE

Antes de começar a coleta, preencha os dados da ave e verifique se os dados do kit conferem com os dados da ave a ser coletada.

INSTRUÇÕES PARA COLETA DE PENAS

- Preferencialmente escolha penas em crescimento.
- Colete as penas do animal.
- Pregue as penas com durex no kit sem prender ou encostar no **BULBO**.

O **BULBO** é o local da pena aonde se encontra o material genético para análise.

Cartucho (com sangue no bulbo):

- Colete duas penas da cauda ou da asa.

Pena Seca (sem sangue no bulbo):

- Em passeriformes: colete aproximadamente 15 penas do peito.
- Em psitacídeos: colete de 8 a 15 penas do peito.

INSTRUÇÕES PARA COLETA DE SANGUE

- Ao coletar material de mais de uma ave, não se esqueça de limpar a tesoura ou alicate com álcool afim de evitar contaminação de material genético entre coletas.
- Corte um pequeno pedaço de unha (conforme indicado no desenho);
- Pingue duas ou mais gotas dentro do círculo;
- Deixe secar em local seco e fora da luz.

DOBRAR O KIT NOS LOCAIS INDICADOS PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS AMOSTRAS E ENVIAR POR CORREIOS PARA:

Endereço:

Rua Atenas, 257, Prado - Cep: 30411-230
Belo Horizonte - MG - Brasil

☎ 31 3324-4030

☎ 31 3324-4020

☎ 31 98902-4397

🌐 www.zoogene.com.br

✉ zoogene@zoogene.com.br